

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für das S9 AutoSet bzw. S9 Elite Atemtherapiegerät entschieden haben. Bevor Sie diese Geräte in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die gesamte Einführung und das Informationshandbuch.



Das S9 Atemtherapiegerät im Überblick


Das S9 System besteht aus den folgenden Komponenten:

- S9 Atemtherapiegerät • SlimLine Atemschlauch • 90 W bzw. 30 W Netzgerät • S9 Reisetasche • SD-Karte
- S9 SD-Kartenschutzumschlag.

Optionale Komponenten:

- H5i beheizbarer Atemluftbefeuchter • H5i Wasserkammer • Standardatemschlauch
- ClimateLine beheizter Schlauch • 90 W Netzgerät • 30 W Netzgerät (unterstützt nicht den H5i).

1
Deutsch

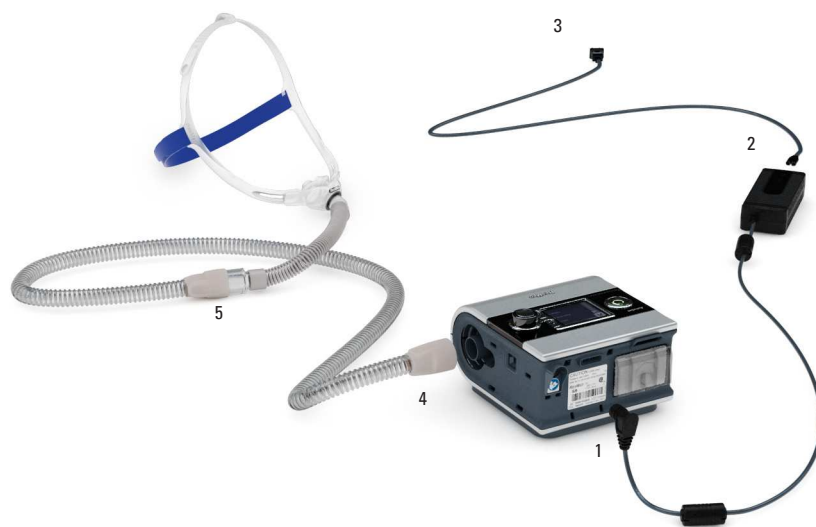

Setup

1. Schließen Sie den Gleichstromstecker des Netzgerätes hinten an das S9 Atemtherapiegerät an.
2. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzgerät an.
3. Stecken Sie das freie Ende des Netzkabels in die Steckdose.
4. Schließen Sie ein Ende des Atemschlauches fest an die Luftauslassöffnung an.
5. Verbinden Sie nun das Maskensystem mit dem freien Ende des Atemschlauches.

Hinweise:

- Weitere Informationen zum Zusammenbau der Maske finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihrer Maske.
- Die empfohlenen Masken finden Sie unter www.resmed.com auf der Produktseite unter Service und Support.



Start-/Stopptaste
Startet und stoppt die Behandlung.

Startmenü

LCD-Anzeige

Setup-Menü
Ermöglicht Änderungen der Einstellungen.

Info-Menü
Ermöglicht Anzeige der Schlafstatistik.

BedienController
Durch Drehen des BedienControllers können Sie durch das Menü scrollen und Einstellungen ändern. Durch Drücken des BedienControllers können Sie ein Menü aufrufen und Ihre Auswahl bestätigen.

Taste:


- Startseite 
- Befeuchtungsniveau 
- Rampe 
- Beheizter Schlauch 
- Klimasteuerung 
- Start-/Stopptaste 
- BedienController 
- Setup-Menü 
- Info-Menü 


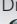


Grundfunktionen des S9 Atemtherapiegerätes

Die Bedienoberfläche Ihres S9 Atemtherapiegerätes umfasst einen LCD-Bildschirm sowie eine Start-/Stopptaste, einen BedienController und die Info- und Setup-Menütasten.

Einstellung der Rampenzeit

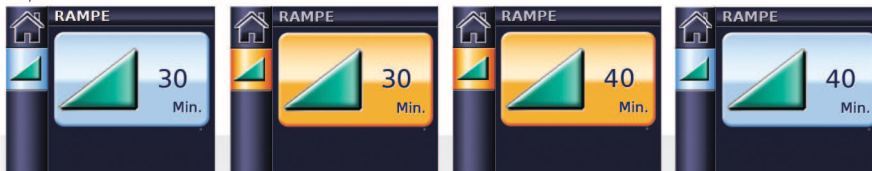
Die Rampenzeit ermöglicht einen besonders angenehmen Therapiestart. Sie beschreibt den Zeitraum, in dem der Druck von einem niedrigen Anfangsdruck auf den Behandlungsdruck ansteigt. Einstellung der Rampenzeit:





1. Drehen Sie vom Startbildschirm aus , bis der Bildschirm RAMPE blau erscheint.
2. Drücken Sie auf . Die Auswahl wird in orange hervorgehoben.
3. Drehen Sie , bis die gewünschte Rampenzeit angezeigt wird.
4. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Die Maskenanlegefunktion

Die Maskenanlegefunktion hilft bei der korrekten Anpassung der Maske. Diese Funktion sorgt dafür, dass Ihnen bereits vor Behandlungsbeginn für drei Minuten der Therapiedruck zugeführt wird, um Ihnen Zeit zu geben, den Maskensitz zu korrigieren und so Leckagen zu minimieren.

1. Legen Sie Ihre Maske entsprechend den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung für die Maske an.
2. Drücken und halten Sie  von der Startseite aus drei Sekunden lang. Es erscheint einer der folgenden MASKENSITZ Bildschirme:

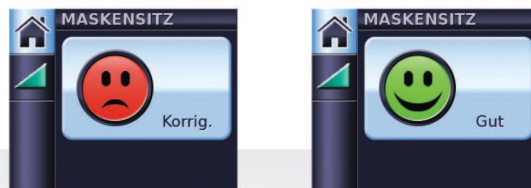

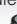


3. Korrigieren Sie gegebenenfalls den Sitz Ihrer Maske, des Maskenkissens und der Kopfbänder, bis die Maske sicher und bequem sitzt. Nach drei Minuten beginnt die Behandlung mit dem eingestellten Druck. Die Maskenanlegefunktion kann jederzeit durch Drücken von  beendet werden.



4



Die Auswahl des Maskentyps



Auswahl des Maskentyps:



- 


1. Drücken Sie . Es erscheint der Bildschirm EINSTELLUNGEN.
- 

2. Drehen Sie , bis „Maske“ in blau erscheint.
- 

3. Drücken Sie . Die Auswahl wird in orange hervorgehoben.
- 



4. Drehen Sie , bis die gewünschte Maskeneinstellung angezeigt wird.
- 

5. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 

6. Drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Erste Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
2. Ändern Sie bei Bedarf die Rampenzeit.
3. Legen Sie Ihre Maske entsprechend den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung Ihrer Maske an.
4. Um die Behandlung zu starten, atmen Sie ganz einfach in Ihre Maske und/oder drücken Sie .
5. Legen Sie sich hin und platzieren Sie den Atemschlauch so, dass Sie beim Schlafen nicht in Ihrer Bewegungsfreiheit gestört werden.
6. Sie können die Behandlung jederzeit unterbrechen, indem Sie die Maske abnehmen und/oder  drücken.

Hinweis: Hat Ihr Arzt SmartStart aktiviert, startet die Druckzufuhr automatisch, sobald Sie in die Maske atmen, und stoppt automatisch, sobald Sie diese abnehmen.

Reinigung und Instandhaltung

Pflegeanweisungen für Ihre Maske und Ihren Atemluftbefeuchter finden Sie in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen dieser Produkte.

Täglich

Entfernen Sie den Schlauch vom Gerät und verwahren Sie ihn an einem sauberen, trockenen Ort.

Wöchentlich

1. Nehmen Sie den Atemschlauch vom S9 Atemtherapiegerät und von der Maske ab.
2. Waschen Sie den Atemschlauch in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
3. Spülen Sie ihn gut ab und lassen Sie ihn hängend trocknen.
4. Schließen Sie den Atemschlauch vor dem nächsten Gebrauch wieder an der Luftauslassöffnung und der Maske an.

Monatlich

1. Reinigen Sie das Gehäuse des S9 Atemtherapiegerätes mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
2. Wechseln Sie den Luftfiltereinsatz aus (s.u.).

Auswechseln des Luftfilters

Wechseln Sie den Luftfilter monatlich (oder bei Bedarf öfter) aus.

1. Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung hinten am S9 Atemtherapiegerät.
2. Entfernen und entsorgen Sie den alten Luftfiltereinsatz.
3. Setzen Sie einen neuen Filter von ResMed ein. Stellen Sie dabei sicher, dass er flach in der Luftfilterabdeckung sitzt.
4. Bringen Sie die Luftfilterabdeckung wieder an.



7
Deutsch

SD-Karte

Die bereitgestellte SD-Karte ermöglicht das Sammeln von Therapiedaten aus Ihrem S9 Atemtherapiegerät sowie die Aktualisierung von Geräteeinstellungen durch Ihren Arzt. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, entnehmen Sie die SD-Karte, legen Sie sie in den Schutzumschlag und schicken Sie sie an Ihren Arzt.

Herausnehmen der Karte

1. Drücken Sie leicht gegen die Karte, um sie herauszuholen.
2. Nehmen Sie die Karte heraus.
3. Legen Sie die Karte in den Schutzumschlag.
4. Schicken Sie Schutzumschlag gemäß den Anweisungen an Ihren Arzt.

Weitere Informationen zum Entnehmen und Einführen der SD-Karte finden Sie auf dem im Lieferumfang Ihres Atemtherapiegerätes enthaltenen Schutzumschlag der S9 SD-Karte. Bewahren Sie den Schutzumschlag der S9 SD-Karte zum zukünftigen Gebrauch auf.



Hinweise:

- Informationen zur Fehlersuche finden Sie im Informationshandbuch.
- Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.resmed.com.